

Компания «Мелдана»
Тел.: 8-800 775-65-96
sale@meldana.com
www.meldana.com

Бесконтактный измеритель температуры



Руководство пользователя

ТЕРМО-03

Содержание

Введение	2
Технические характеристики	3
Описание	4
Работа с прибором	5
1. Включение, выключение и сброс настроек	5
2. Просмотр результатов предыдущих измерений	5
3. Удаление результатов предыдущих измерений	6
4. Выход из меню настроек	6
5. Измерение температуры	6
Меню настроек	7
1. Установка языковых настроек	7
2. Единицы измерения температуры	7
3. Громкость динамика	7
4. Режим работы	8
5. Предельное значение нормальной температуры	8
6. Автоматическое выключение	8
7. Минимально допустимое значение температуры	9
8. Звуковой сигнал	9
9. Звуковой сигнал при выявлении повышенной температуры	9
Монтаж и установка	10
Важная информация	10
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	11

Введение

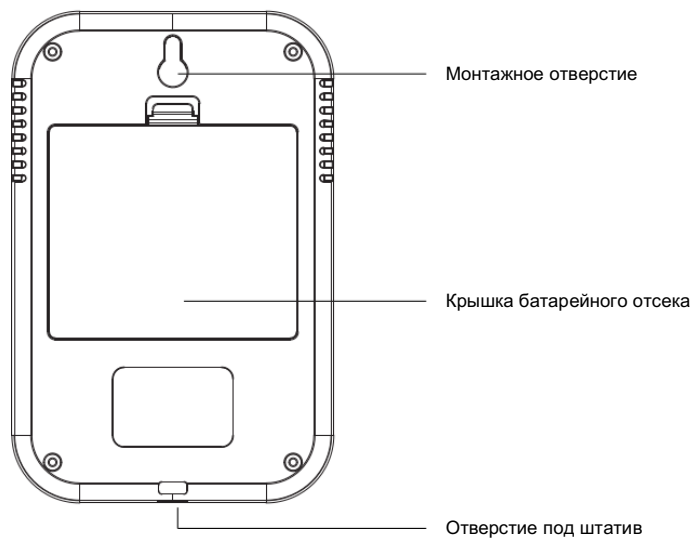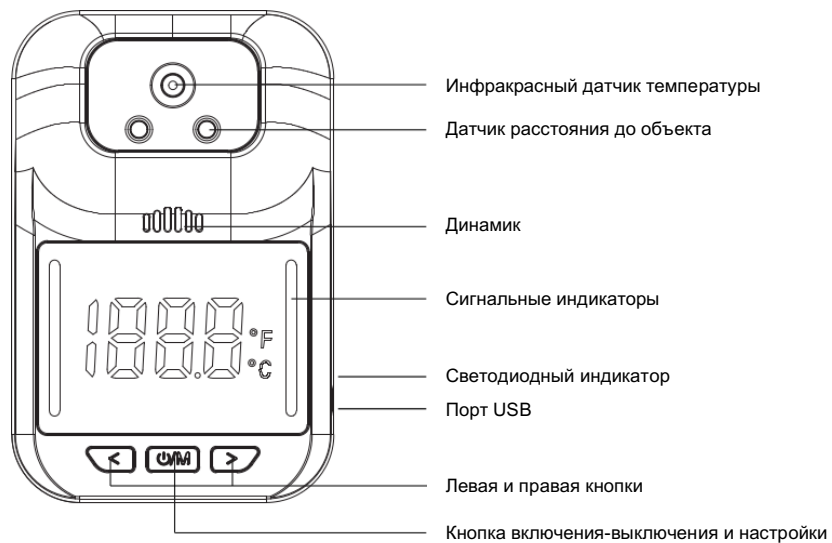

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о товаре:

Артикул: _____
Наименование товара: Бесконтактный измеритель температуры
Серийный номер: _____

Сведения о Продавце:

Наименование организации: ООО МЕЛДАНА
Адрес: г. Екатеринбург, переулок Проходной, 1, оф. 11
Телефон: +7 (343) 379-52-39

Полный текст положения о гарантийном обслуживании представлен на интернет-странице: <https://meldana.com/help/warranty>

Срок гарантии — 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, товар получил, претензий по комплектности и внешнему виду не имею.


_____/_____
(подпись покупателя)

(подпись продавца)
М.П.


Дата покупки: _____ 202__ г.

Внимание!
Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!
Адрес сервисного центра ООО «МЕЛДАНА»
620050, г. Екатеринбург, пер. Проходной, стр. 1, офис 11

Монтаж и установка

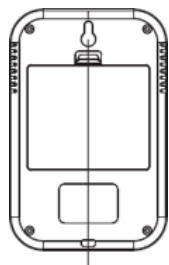

Монтажное отверстие для настенной установки

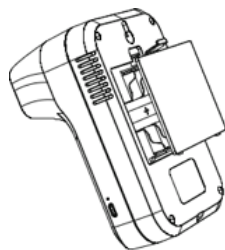


Установка батарей

Снимите крышку батарейного отсека и установите батареи, соблюдая полярность

Важная информация

1. Ответственность за соблюдение требований электромагнитной совместимости, а также правил эксплуатации несет пользователь прибора.
2. В случае перемещения прибора на новое рабочее место с другими условиями окружающей среды, выдержите его в выключенном состоянии не менее 30 минут.
3. Линзы очков и волосы могут исказить инфракрасное излучение, идущее от объекта. При измерении температуры необходимо снять очки и убрать волосы со лба, расположив его прямо напротив датчика температуры.
4. При работе вне помещений не допускайте воздействия на прибор прямого солнечного света.
5. Устанавливайте прибор вдали от кондиционеров, вентиляторов, нагревательных устройств и в местах, где отсутствуют сквозняки.
6. В целях экономии электроэнергии прибор автоматически выключается после 12 часов бездействия.
7. Пользуйтесь только качественными батареями, имеющими сертификаты безопасности; при их установке соблюдайте полярность.
8. Своевременно заменяйте разрядившиеся батареи.
9. В холодное время года используйте прибор только в помещении; замеры выполняйте строго на указанном в данном Руководстве расстоянии до объекта.

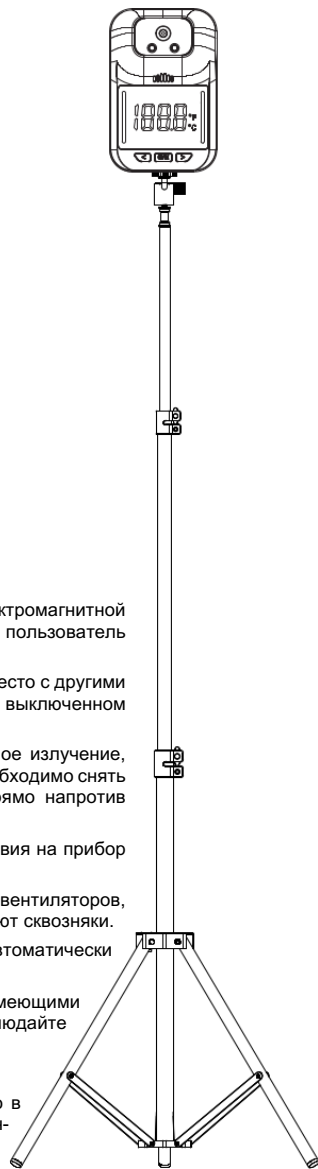


Установка на штативе


Технические характеристики

Точность	±0,2° (измерения выполняются не ранее, чем через 30 минут после установки прибора на рабочем месте)
Оповещение	Автоматическое оповещение (мигающий индикатор и звуковой сигнал в течение 5 секунд), если результат не соответствует норме
Дистанция замера	Автоматический замер на расстоянии 5–10 см от объекта
Дисплей	Цифровой дисплей
Источники питания	Питание от блока питания турникета
Способ установки	Настенная и на штативе
Рабочая температура	-10°C — +40°C (рекомендуемый интервал -5°C — +35°C)
Диапазон измерений	+30°C — +50°C
Время отклика	0,5 с
Емкость хранилища	118 ячеек для хранения результатов с возможностью просмотра и удаления
Питание	Постоянный ток 12 В, 0,7 А
Вес	175 г
Габариты	145×95×80 мм
Счетчик	0–1999


Описание

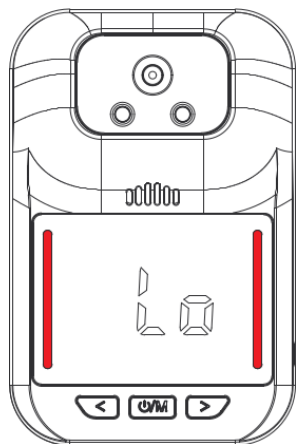


«Lo»
Температура ниже +32°C.
Сигнальные индикаторы мигают красным цветом, голосовое оповещение — «Повторите измерение».

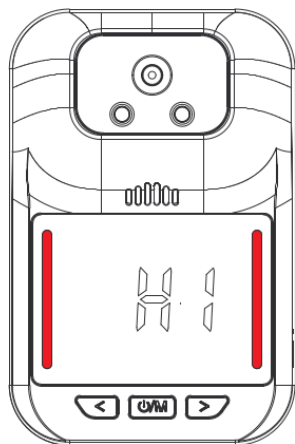

«Hi»
Температура выше +42°C.
Сигнальные индикаторы мигают красным цветом, голосовое оповещение — «Повторите измерение».

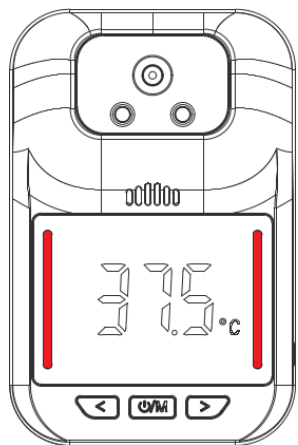


Повышенная температура
Сигнальные индикаторы мигают красным цветом, раздается предупреждающий звуковой сигнал.

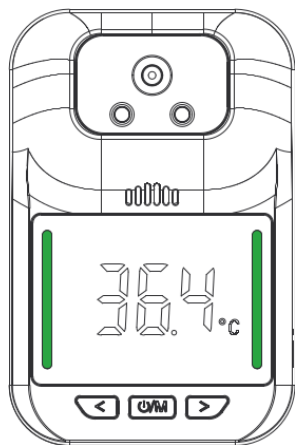


Нормальная температура
Сигнальные индикаторы мигают зеленым цветом, голосовое оповещение — «Температура в норме».

7. Минимально допустимое значение температуры


Для входа в настройки минимально допустимого значения температуры нажмите семь раз центральную кнопку, а затем левой или правой кнопкой выберите одну из настроек: «пог» (задана по умолчанию), «32.0» или «Lo».

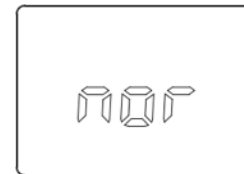

Стандартный режим.
Поддерживает работу при низких температурах окружающей среды.

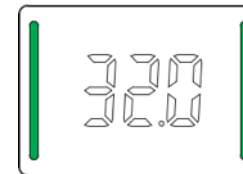


Если температура объекта ниже +32,0°C, сигнальные индикаторы мигают зеленым цветом; голосовое сообщение — «Температура в норме».

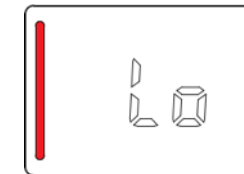


Если температура объекта ниже +32,0°C, сигнальные индикаторы мигают красным цветом, голосовое оповещение — «Повторите измерение».

8. Звуковой сигнал

Для входа в настройки звукового сигнала, который раздается перед голосовым оповещением, нажмите восемь раз центральную кнопку, а затем левой или правой кнопкой выберите требуемый сигнал: «D0» — «двойной колокольчик», «D1» — «бип» (задано по умолчанию).

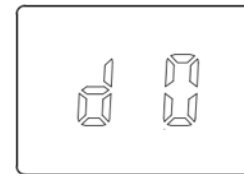


D0 — «двойной колокольчик»

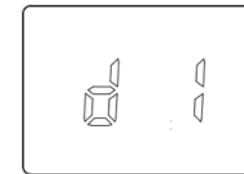


D1 — «бип»

9. Звуковой сигнал при выявлении повышенной температуры

Для входа в настройки звукового сигнала, который раздается при выявлении объекта с повышенной температурой, нажмите девять раз центральную кнопку, а затем левой или правой кнопкой выберите требуемый режим: «R0» — сигнал тревоги, «R1» — повторяющийся «бип» (задано по умолчанию).

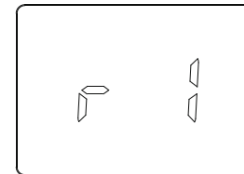


R0 — сигнал тревоги

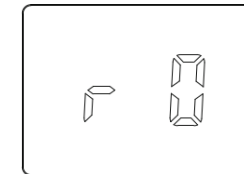


R1 — сигнал «бип», повторяющийся в течение 5 сек.

4. Режим работы


Для выбора режима работы нажмите четырежды центральную кнопку, а затем левой или правой кнопкой установите требуемый режим.

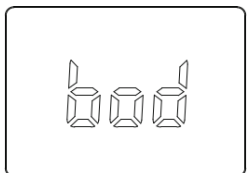

Измерение температуры тела

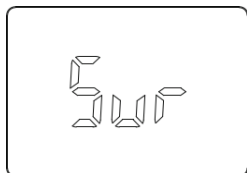


Измерение температуры поверхности

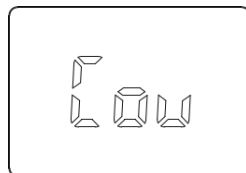

Режим счетчика


5. Предельное значение нормальной температуры

Для входа в настройки предельного значения нормальной температуры нажмите пять раз центральную кнопку, а затем левой или правой кнопкой установите нужное значение в интервале от $+36,0^{\circ}\text{C}$ до $+38,0^{\circ}\text{C}$. Значение по умолчанию — $+37,5^{\circ}\text{C}$. Оповещение при превышении заданной величины работает только в режиме измерения температуры тела.

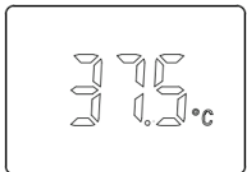


6. Автоматическое выключение

Для входа в настройки функции автоматического выключения прибора нажмите шесть раз центральную кнопку, а затем левой или правой кнопкой выберите нужный режим. Значение по умолчанию — «A1», в этом режиме прибор автоматически выключается после 12 часов бездействия.

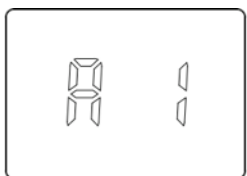

A1 — прибор выключится автоматически через 12 ч.

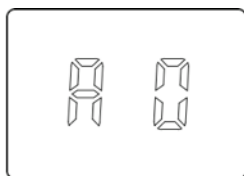

A0 — функция отключена.

Работа с прибором

1. Включение, выключение и сброс настроек

Для включения прибора нажмите центральную кнопку на панели управления.


Для выключения прибора нажмите центральную кнопку на панели управления и удерживайте ее в течение 2 секунд.

Для сброса настроек прибора нажмите и удерживайте в течение 6 секунд центральную кнопку на панели управления. На дисплее отобразится сообщение «RST», и термометр вернется к заводским настройкам.

2. Просмотр результатов предыдущих измерений

Для просмотра предыдущих результатов нажимайте левую или правую кнопки на панели управления. В памяти прибора может храниться до 118 наборов данных.

Во время просмотра результатов на дисплее сначала отображается порядковый номер записи, а затем измеренная температура.


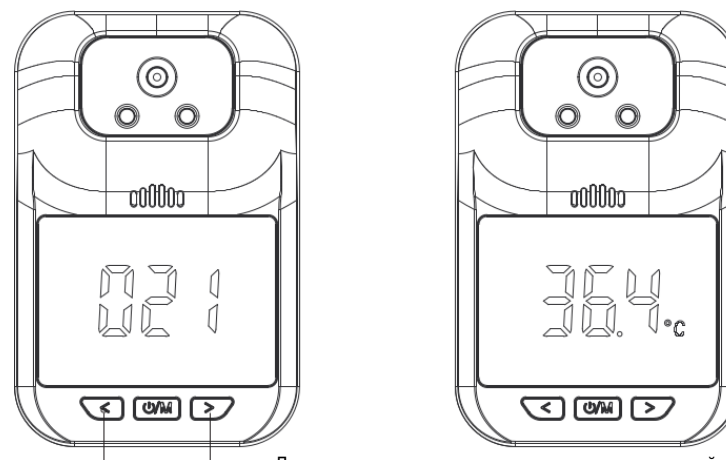


Для просмотра предыдущих результатов нажимайте левую или правую кнопки.

3. Удаление результатов предыдущих измерений

В режиме просмотра предыдущих результатов нажмите и удерживайте в течение 2 секунд левую или правую кнопку. На дисплее отобразится сообщение «CLr», после чего на экране появятся три тире, указывающие, что запись была удалена.

Для выхода из режима просмотра и удаления результатов нажмите центральную кнопку на панели управления. Если кнопка не нажата, прибор автоматически вернется в рабочий режим через 10 секунд.

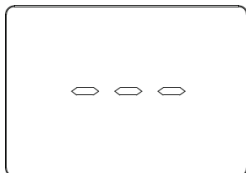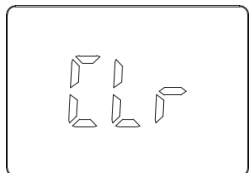


4. Выход из меню настроек

- (1) Для выхода из меню настроек нажмите и удерживайте центральную кнопку на панели управления.
- (2) Если кнопка не нажата, прибор автоматически вернется в рабочий режим через 10 секунд.

5. Измерение температуры

Для измерения температуры расположите объект на расстоянии 5–10 см от датчика прибора.

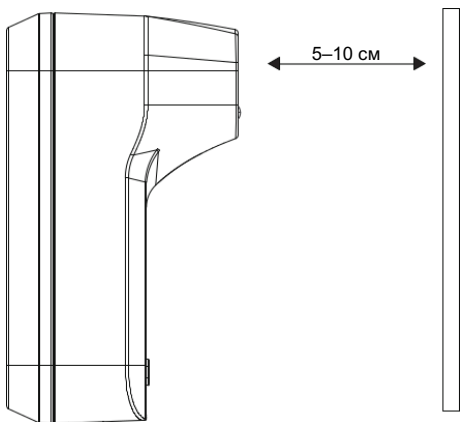


Меню настроек

1. Установка языковых настроек


Для входа в настройки голосовых оповещений нажмите один раз центральную кнопку, а затем левой или правой кнопкой выберите требуемый язык.

Прибор поддерживает следующие языки: **RU** — русский; CH/CH1/CH2/CH3 — китайский; EN — английский; IT — итальянский; KR — корейский; SP — испанский; JP/JP1 — японский; GE — немецкий; PO — португальский; FR — французский; AR — арабский; IN — хинди; HO — голландский; TL — тайский; PL — польский. Настройка «DI» означает, что вместо голосовых оповещений будет раздаваться звуковой сигнал («двойной колокольчик» или «бип»).

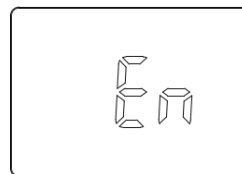


2. Единицы измерения температуры

Для входа в настройки единиц измерения температуры нажмите дважды центральную кнопку, а затем левой или правой кнопкой выберите нужную шкалу: «C» — градусы Цельсия, «F» — градусы Фаренгейта.

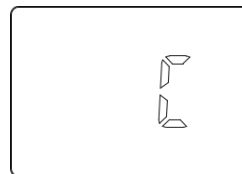

Шкала Цельсия

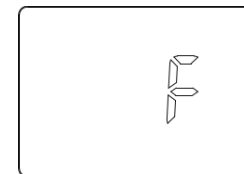

Шкала Фаренгейта

3. Громкость динамика

Для входа в настройки громкости динамика нажмите трижды центральную кнопку, а затем левой или правой кнопкой установите нужный уровень громкости: «Vo0» — минимальный, «Vo5» — максимальный. Значение по умолчанию — «Vo2».

